

CODAN Contrelle®



Activgard





CODAN Contrelle®




Contrelle® Activgard

on täiesti uus lähenemine pingutusinkontinentsi ehk uriinipidamatuse probleemi lahendamiseks. Probleemi peamiseks tekitajaks on tihti just sünnituste, menopausiaegsete muutuste või muude vananemisega seotud põhjuste tõttu nõrgenenud vaagnapõhi. Kui vaagnapõhi sel viisil lõdveneb, vajub põis pisut allapoole ning põiekaela kalle muutub. Selle tulemusena kaob äkilise pinge ajal tahtlik kontroll põiega seotud lihaste üle.

Contrelle Activgard on sellise kujuga, et tuppe sisestatuna tõstab see pisut põit, parandab seeläbi põiekaela kallet ning ennetab uurini lekkimist, isegi pingutuse ajal. Sama oluline on seegi, et patsient saab normaalselt urineerida ega pea Contrelle Activgardi selle jaoks eemaldama.

Ainulaadne disain ja toime

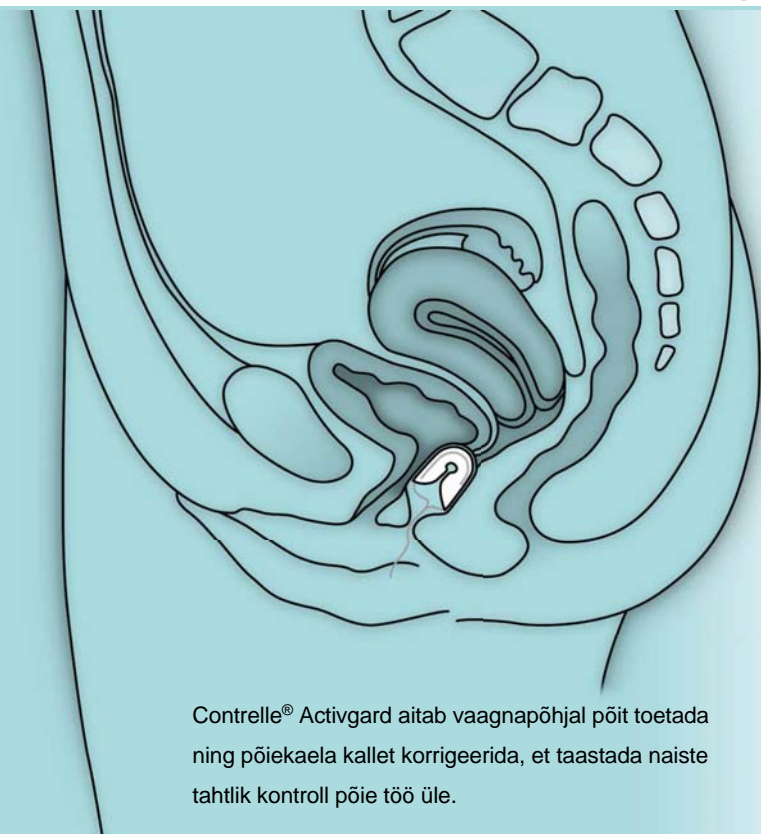

Contrelle® Activgard aitab vaagnapõhjal põit toetada ning põiekaela kallet korrigeerida, et taastada naiste tahtlik kontroll põie töö üle.

Contrelle® Activgard

toimib pigem aktiivselt kui passiivselt. Toode on valmistatud pehmest vormi valatud plastist. Enne sisestamist murtakse seade kokku ning tänu elastsusele avaneb see tupes uuesti. Nii tekib õrn surve, mis tõstab põit ja kohandub samal ajal ideaalselt kehaliigutustega. Contrelle Activgardi välispind on spetsiaalselt nii kujundatud, et see istuks kui valatult vastu põiekaela ja päarakut – seepärast on väga oluline, et seade sisestatakse tuppe korrektselt, vastavalt joonistele.

Lihntne kasutada

Contrelle® Activgardi on sama lihtne kasutada kui tampooni. Seda ei ole näha ega tunda. Kui toodet enne kasutamist veega immutada, ei ima Activgard tupe limaskestast loomulikku niiskust. Contrelle Activgard on lihtsal põhimõttel töötav vahend, mis ravib sümptomite asemel pigem probleemi.



Loomulik elastsus tagab
õrna toe

Tavapärane tualetiskäik

Urineerimine on tavapärane – Activgardi ei pea eemaldama. Contrelle Activgard ei suru kusiti kokku, vaid toetab põiekaela, et taastada loomulik kontroll põietegevuse üle.

Kuni 16 tundi päevas, mõnel juhul ka vähem

Contrelle Activgardi võib kanda kuni 16 tundi päevas. Seade tuleb eemaldada enne vahekorda ning raseduse ajal kanda ainult pärast arstiga konsulteerimist. Menstruatsiooni ajal peaks Activgardi vahetama iga 4–6 tunni järel ning kasutama koos kehavälise sanitaarvahenditega. Tampoonid ei sobi Activgardiga koos kasutamiseks.

Palju eeliseid

Contrelle Activgard on lihtne ja tõhus vahend pingutusinkontinentsi probleemiga naistele.

Elu muutub taas normaalseks

Contrelle Activgard aitab naistel põietegevust kontrollida ning seeläbi taas normaalset elu elada. Enam ei pea muretsema äkiliste kontrollimatute uriinilekete pärast, kandma ebamugavaid sidemeid ega muretsema uriinilõhna pärast. Nüüd saab jälle elada normaalselt, nagu enne uriinipidamatuse tekkimist.

Märkamatu ja diskreetne

Contrelle Activgard paigaldatakse tuppe, nii et see on sama märkamatu ja diskreetne kui tampoon. Seda võib vahetamata kanda kuni 16 tundi päevas. Contrelle Activgard on ühekordselt kasutatav toode, mida kantakse ühe korra ja visatakse siis minema.



Contrelle Activgard
aplikaatoril

Contrelle® Activgard

Kolm suurust

Contrelle Activgard on saadaval kolmes suuruses. Kasutaja peab neid proovima, et endale sobivaim suurus leida. Mõned naised võivad esialgu kuni tootega harjumiseni kogeda kerget ebamugavustunnet umbes samamoodi nagu kontaktläätsti kasutades.

Vaagnapõhjalihaste treenimine

Contrelle Activgard ei asenda vaagnapõhjalihaste harjutusi. Samas aitab toode harjutuste mõju tugevdada – ning on suuresti abiks juhtudel, kus vaagnapõhjalihaste harjutused tulemusi ei anna.

Toksilise šoki sündroom

Toksilise šoki sündroomi esineb väga harva. Pooled harvadest teadaolevatest juhtumitest on esinenud tampoone kasutavatel naistel. Suurem osa neist on olnud nooremad naised, kes kasutavad üliimavaid tampoone. Contrelle Activgard on korrektsel kasutamisel täielikult mitteimav ning enne kasutamist veega läbi immutatud.

PH ning bakteriaalne tasakaal ei muutu

Taanis läbi viidud uuringute põhjal ei muutu ei pH ega loomulik bakteriaalne tasakaal. Samuti ei suurene tupe- või põiepõletike ega limaskesta ärrituse risk. Activgardi paigaldamist lihtsustab tupekreemi kasutamine; vanematel patsientidel võib kasu olla lokaalsest hormoonravist.



Contrelle Activgardi peab enne kasutamist veega immutama.

Kokkuvõtlik kasutusjuhend

Contrelle Activgardi on sama lihtne kasutada kui tampooni.

- Activgardi tuleb immutada tavalises puhtas vees.
- Seejärel paigaldatakse seade aplikaatorile nii, et nõõri sõlm asetseb aplikaatori otsas asuvas süvendis ning Activgardi seade tõmmatakse üle aplikaatori ümara pea.
- Järgnevalt sisestatakse aplikaator ja Activgard tuppe kuni aplikaatoril asuvate rõngasteni..
- Nõõr libistatakse õrnalt süvendist välja ning aplikaator eemaldatakse tupest ja pestakse, et seda saaks uuesti kasutada.
- Activgard eemaldatakse kehast õrnalt nõõrist tõmmates.

CODAN

Contrelle Activgard on põhjalikult testitud

1994. aastal tehti Contrelle Activgardiga kaks kliinilist uuringut. Ühes osales 26 pingutusinkontinentsiga patsienti Taanis Glostrupi haiglas ning teises 129 pingutusinkontinentsiga naist kümnes erinevas Rootsi haiglas.

Uuringutes arvestati nii subjektiivsete kui ka objektiivsete parameetritega. Objektiivsetes testides (24 tundi) kaaluti sidemeid, et määratleda tahtmatult lekkinud uriini kogus. Taani uuringus läbisid patsiendid enne toote testimist põhjalikud uuringud, nende seas tupekultuurid ja pH, jääkuriin, uriinikultuurid, urineerimispäevik ja küsimustik. Subjektiivseid parameetreid hinnati ankeetidega.

80% patsientidest täheldasid positiivseid tulemusi

Taani uuringus hindas 21 inimest 22st Contrelle Activgardiga rahuldavaks või väga heaks ning Rootsi uuringus vastavalt 66 90st. Subjektiivsete arvamuste põhjal arvas 87% Taani patsientidest, et Contrelle Activgard vähendas lekete tihedust ning 72% leidis, et lekkimise korral eraldus uriini vähem. Vastavad Rootsi uuringu protsendid olid 77% ja 74%.

35% saavutasid täieliku pidamise

Objektiivsed hinnangud näitasid, et Rootsi uuringus saavutas 35% testgrupist täieliku pidamise ning 77% saavutas positiivseid tulemusi. Taanis oli täieliku pidamise hulgaks 36% ning positiivsete tulemuste protsent oli 64%.

Rohkem infot toote kohta:
www.contrelle.ee; www.medreto.ee

Maaletooja:
Medreto OÜ
Mustamäe tee 22
10621 Tallinn
e-mail: info@medreto.ee
tel: 6827242

Märgatavad kõrvalnähud puuduvad

Uuringud näitasid ka seda, et Contrelle Activgard ei põhjusta märgatavaid muutusi pH-tasemes ega bakterioloogilistes näitutes, ei suurenda tupe- ega põieinfektsioonide riski ega ärrita limaskesta. Subjektiivsel hindamisel esines mõnel patsiendil kergelt ebamugavustunnet, eriti tootega harjumise ajal. Samas ütles suurem osa neist patsientidest, et nad jätkaksid Contrelle Activgardiga kasutamist.



Contrelle® Activgard

Suurus 1

REF 76.1001 30 tk pakis

Suurus 2

REF 76.1002 30 tk pakis

Suurus 3

REF 76.1003 30 tk pakis

Iga pakk sisaldab aplikaatorit.

