

SARS-CoV-2


Antigeeni kiirtesti komplekt enese testimiseks

(Kolloidkulla immunokromatograafia)




Tegevuskäik

- 1** Pese ja kuivata käed. Enne testimise alustamist ühtlustage reagentide ja proovimaterjali temperatuur toatemperatuuriga. Seejärel eemalda välimisest fooliumpakendist testkaart.

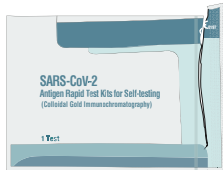

- 2** Aseta testkaart horisontaalsele tasapinnale, eemalda kattedekile kleebiselt. Testkaart peab olema tasasel pinnal kuni testitulemuse lugemiseni.

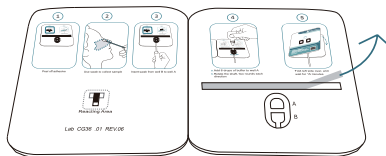

- 3** Võta pakendist välja vatipulk, haarates ilma vatita otsast. Proovi kogumiseks võta ninanõonest proov standardset viisil:



NB: Vatipoolset otsa mitte puudutada.




NB: Proov tuleb võtta mõlemast ninaõõnest.



Vatipulga pea tuleb sisestada ninaõõnde kuni takistuseni (u. 2-3 cm) ja keerutada õrnalt 5 korda. Seejärel võtta proov samamoodi teisest ninaõõnest, et tagada piisavas koguses proovimaterjali kogumine.

* Kasutajal on soovitatav sisestada vatipulk nii sügavale, kuni takistus tuleb ette.


- 4** Sisesta vatipulga ots A süvendisse B süvendi põhja kaudu.

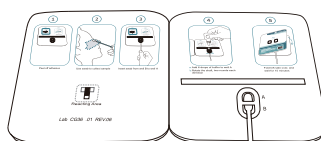

- ①** Hoia kaart horisontaalselt avatuna.



- 5** Ava ja tühjenda proovilahuse viaal süvendisse A. Seejärel keeruta vatipulka süvendis A kaks ringi mõlemas suunas.

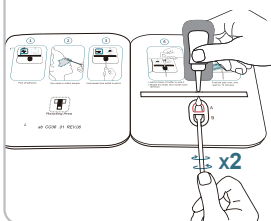


- ①** Hoia kaarti laual horisontaalselt avatuna.

NB: Kui vatipulka ei keerutata enne testkaardi sulgemist, võib test anda valenegatiivse tulemuse.

NB: Ära keeruta pulka ja tilguta lahust samaaegselt.

- 6** Pööra testkaardi vasak külg parema külje peale ning suru ettevaatlikult kleepuvasse asendisse, nii et küljed täielikult kattuksid ning alusta aja mõõtmist.

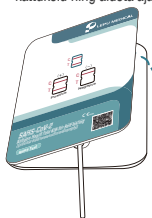


- ①** Hoia kaarti laual horisontaalselt

- 7** Oota, kuni ilmub nähtavale lillakaspruun joon. Testi tulemused peavad ilmuma nähtavale 15-20 minuti jooksul.

Tulemuste lugemiseks

- ①** Hoia kaarti laual sirgelt. Testkaarti mitte liigutada.

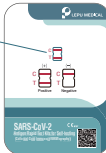


15-20 min

NB: Kaardi liigutamine võib anda valed tulemused.

NB: Enne 15 või pärast 20 minuti möödumist loetud tulemused võivad olla valed.

- 8** Pärast testimist pane testkaart, vatipulk ja proovilahuse viaal välimisse fooliumpakendisse ja sulge see kindlalt. Pakend viska prügikonteinerisse, järgides kohalike jäätmekäitluseeskirju.

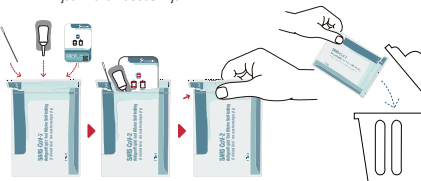

SARS-CoV-2


Antigeeni kiirtesti komplekt enese testimiseks

(Kolloidkulla immunokromatograafia)




Testi tulemuste tõlgendamine

- Positiivne (+): kontrolljoone (C) ja testijoone (T) kohale ilmub lillakaspunane joon.

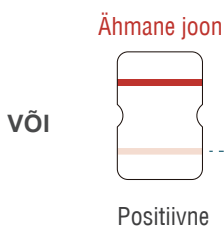

Alumine joon võib olla väga ähmane. Isegi kui ilmub nõrk roosa/lilla joon, on test positiivne.

- Negatiivne (-): Lillakaspunane joon ilmub ainult kontrolljoone (C) kohale. Testijoone (T) kohale ei ilmu lillakaspunast joont.

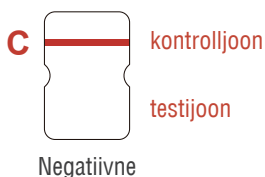

- Kehtetu: kui kontrolljoone (C) kohale ei ilmu lillakaspunast joont või kontrolljoone (C) kohale ilmub sinine joon, siis näitab see, et tegevuskäik on olnud vale või testkaart on saanud kahjustada. Sellisel juhul loe juhised uuesti tähelepanelikult läbi ja korda testi uue testkaardiga. Kui probleem püsib, siis lõpetage sama partii numbriga toodete kasutamine kohe ja võtke ühendust toote tarnijaga.

